



# Masimo SafetyNet Alert™

Oxygen Monitoring and Alert System  
Système de surveillance et d'alerte pour l'oxygène



Quick Start Guide  
Guide de démarrage rapide

© 2023 Masimo. All rights reserved/Tous droits réservés  
303433/11555B-0523 E-11532A

## SYSTEM COMPONENTS | COMPOSANTS DU SYSTÈME



### Masimo Chip

- Reusable chip snaps into the sensor and communicates with the Home Medical Hub.

### Puce Masimo

- La puce réutilisable s'insère dans le capteur et communique avec le boîtier de télésurveillance médicale.




### Masimo Halo App

- Displays oxygen, pulse rate and other data.
- Cloud sends alerts to Home Medical Hub and mobile device.
- Compatible with most mobile devices. (Mobile device not included.)

### Application Masimo Halo

- Affiche la saturation en oxygène, la fréquence du pouls et d'autres données.
- Le Cloud envoie des alertes au boîtier de télésurveillance médicale et au téléphone portable.
- Compatible avec la plupart des appareils mobiles. (Téléphone portable non inclus.)

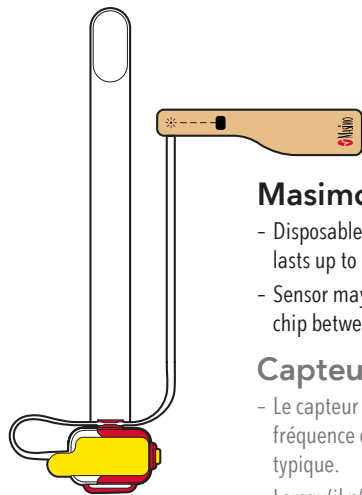

### Masimo Sensor

- Disposable sensor measures oxygen level and pulse rate and lasts up to 96 hours in typical continuous usage.
- Sensor may be removed when not in use. Be sure to remove chip between use to preserve battery life.

### Capteur Masimo

- Le capteur à usage unique mesure le niveau d'oxygène et la fréquence du pouls pendant 96 heures en utilisation continue typique.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, le capteur peut être retiré. Veillez à retirer la puce entre deux utilisations pour préserver la durée de vie de la batterie.




Chip Holder  
Porte-puce

### Home Medical Hub

- Collects data from Masimo Sensor.
- Sends data to smartphone app.
- Store the chip in the holder on top of Home Medical Hub.

### Boîtier de télésurveillance médicale

- Recueille les données du capteur Masimo.
- Envoie les données à l'application pour smartphone.
- Conservez la puce dans le porte-puce situé sur le dessus du boîtier de télésurveillance médicale.

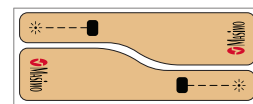

### Replacement Tapes

Additional tapes for replacement as needed.


### Bandelettes de rechange

Bandelettes supplémentaires à remplacer selon les besoins.


## SET UP APP & CONNECT HOME MEDICAL HUB | CONFIGURATION DE L'APPLICATION ET CONNEXION DU BOÎTIER DE TÉLÉSURVEILLANCE MÉDICALE

1

1. Download the app and create an account.  
Téléchargez l'application et créez un compte.

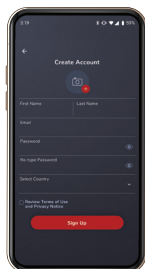

2. Connect Home Medical Hub to power.  
Connectez le boîtier de télésurveillance médicale à l'alimentation.

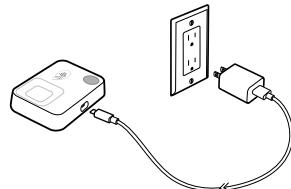

3. Pair Home Medical Hub with phone (Smartphone Bluetooth should be ON).  
Apparez le boîtier de télésurveillance médicale avec le téléphone (la connexion Bluetooth du smartphone doit être activée).



4. Connect Home Medical Hub to Wifi \*. Follow step-by-step instructions on app to set up system.  
Connectez le boîtier de télésurveillance médicale au Wifi \*. Suivez les instructions étape par étape sur l'application pour configurer le système.




\* Only compatible with 2.4 GHz wireless networks.  
\* Compatible uniquement avec les réseaux sans fil de 2,4 GHz.


## SET UP SENSOR | METTRE LE CAPTEUR EN PLACE

2


1. Remove sensor from pouch.  
Retirez le capteur de la pochette.

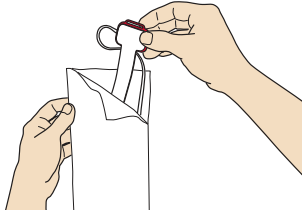


2. Peel off yellow label to activate battery.  
Décollez l'étiquette jaune pour activer la batterie.

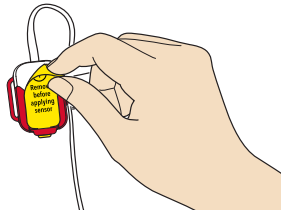

3. Place sensor on wrist as shown and carefully thread the tip of the strap through the open red loop.  
Placez le capteur sur le poignet comme indiqué et faites passer avec précaution l'extrémité du bracelet dans la boucle rouge ouverte.

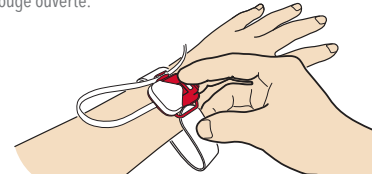


4. Wrap the loose end of the strap around your wrist and press to secure.  
Enroulez l'extrémité libre du bracelet autour du poignet et appuyez pour la fixer.

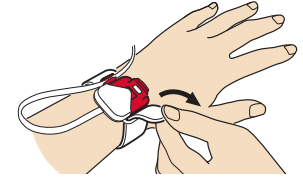


## APPLY SENSOR | APPLIQUER LE CAPTEUR

3


1. Remove part of the plastic film and place star (✱) on top of fingernail of ring finger.  
Retirez une partie du film plastique et placez l'étoile (✱) sur l'angle de l'annulaire.

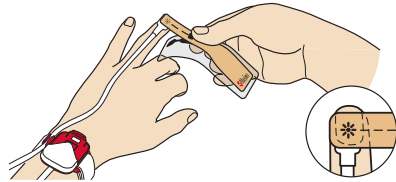


2. Wrap tape around finger so black square (■) is on finger pad directly across from star (✱).  
Enroulez la bande autour du doigt de sorte que le carré noir (■) se situe sur le coussinet du doigt dans l'alignement de l'étoile (✱).

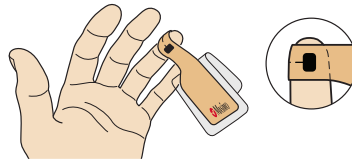


3. Squeeze top and bottom of finger to secure tape.  
Appuyez sur le dessus et le dessous du doigt pour fixer la bande.

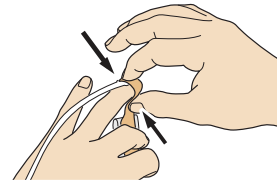

4. Remove plastic film and continue to wrap tape around finger.  
Enlevez le film plastique et enroulez le reste de la bandelette autour du doigt.

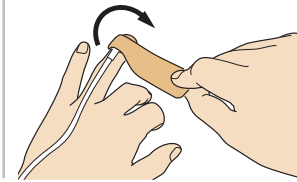


5. Adjust cable to comfortable length.  
Ajustez le câble à une longueur confortable.

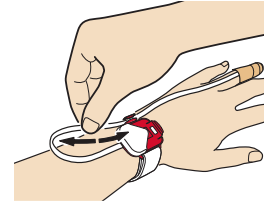


## PAIR AND INSERT CHIP | APPAIREZ ET INSÉREZ LA PUCE

4


1. Hold the chip near the Home Medical Hub and listen for double beep.  
Tenez la puce près du boîtier de télésurveillance médicale et écoutez le double bip.

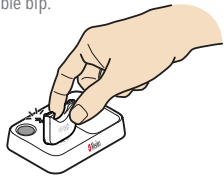


2. Insert the chip into open compartment on the sensor.  
Insérez la puce dans le compartiment ouvert sur le capteur.

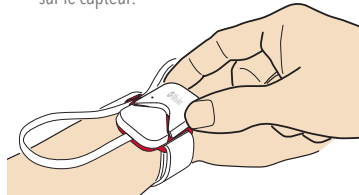

3. Press down on the chip to secure.  
Appuyez sur la puce pour la fixer.

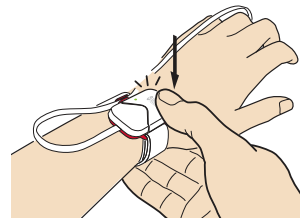

Listen for click to confirm chip placement.  
Assurez-vous d'entendre un clic pour confirmer le placement de la puce.

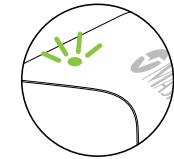


Look for light to confirm chip connection to sensor.  
Vérifiez la présence de lumière pour confirmer la connexion de la puce au capteur.

## CONFIRM SUCCESSFUL PAIRING | CONFIRMEZ L'APPARIEMENT RÉUSSI

5

1. Once the chip is inserted, the Home Medical Hub Bluetooth Status LED will turn off and the Status LED will turn green. The chip light indicator will turn solid blue.  
Une fois la puce insérée, le voyant d'état Bluetooth du boîtier de télésurveillance médicale s'éteint et le voyant d'état LED devient vert. Le voyant lumineux de la puce devient bleu fixe.

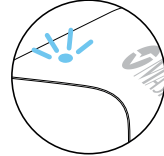


Visit [www.masimo.ca/support](http://www.masimo.ca/support) to see full list of supported devices, purchase additional sensors and view other resources, including videos and instructions.


Visitez le site [www.masimo.ca/support](http://www.masimo.ca/support) pour accéder à la liste de tous les appareils pris en charge, acheter des capteurs supplémentaires et consulter d'autres ressources, telles que des vidéos et des instructions.

## CHANGING THE REPLACEMENT TAPE | CHANGEMENT DE LA BANDELETTE DE RECHANGE


1. Remove used tape from sensor.  
Retirez la bandelette usagée du capteur.

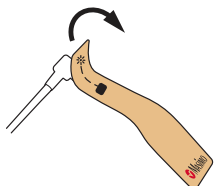

2. Attach new tape in same direction as used tape.  
Fixez la nouvelle bandelette dans le même sens que la bandelette usagée.

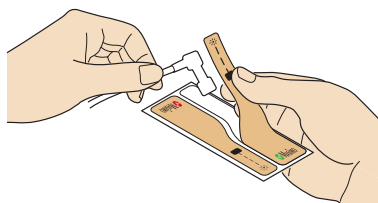

3. Attach sensor to finger.  
Fixez le capteur au doigt.

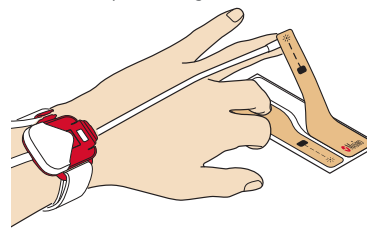

4. Peel the remaining tape off backing.  
Décollez la pellicule protectrice restante du support.

