

Tilslut Masimo Shuttle


For at forbinde Masimo Shuttle til et medicinsk udstyr og en Masimo iSirona, Masimo HBox, eller pc-node skal du følge disse trin:

Bemærk Hvis du ikke har brug for et forlænger kabel, kan du tilslutte Masimo Shuttle direkte til det medicinske udstyr.

1. Tilslut et forlænger kabel med et leverandørspecificeret udgangsstik til den serielle port på det medicinske udstyr.
2. Indsæt det RS-232 9-benede hanstik på Masimo Shuttle i forlænger kablets 9-benede hun-adapter.
3. Sæt USB-A-stikket på Masimo Shuttle i en USB-port på Masimo iSirona, Masimo HBox, eller pc-node.

Sådan tilføjer du en serial enhed i DCX

1. På siden Device List (Enhedsliste) skal du klikke på fanen **Unconfigured** (Ukonfigureret).

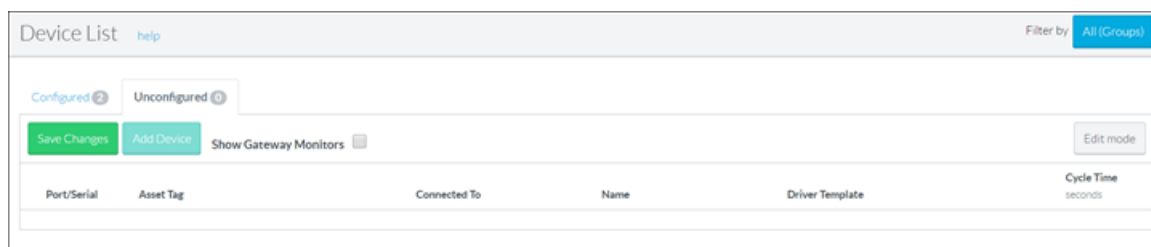

Tekstfeltet **Port/Serial** (Port/seriel) og rullemenuen **Connected To** (Forbundet til) udfyldes automatisk med oplysninger.

2. Alternativt skal du i tekstfeltet **Asset Tag** (Enhedsmærkat) skrive navnet på udstyrets enhedsmærkat. *Dette trin gælder kun for DCX 5.14 og nyere versioner.*
3. I tekstfeltet **Name** (Navn) skal du skrive navnet på udstyret. Navnet på enheden skal være forskellig fra navnene på alle andre enheder på dit system og må ikke indeholde specialtegn.
4. Klik på rullemenuen **Driver Template** (Driverskabelon), og vælg driverskabelonen for udstyret. *For versioner før DCX 5.15 skal du klikke på **Driver (Driver)** rullemenuen.*
5. I tekstfeltet **Cycle Time** (Cyklustid) skal du skrive, hvor ofte, angivet i sekunder, enheden sender data til det punkt, som det er tilsluttet. Du kan også bruge piletasterne til at vælge cycle time (Cyklustid).
6. Klik på **Save Changes** (Gem ændringer).

Systemet konfigurerer enheden og tilføjer den til dit system. Det vises på siden Device List (Enhedsliste) under fanen **Configured** (Konfigureret) og på siden System Overview Map (Systemoversigtskort).