

## Ansluta Masimo Shuttle


Om du vill ansluta Masimo Shuttle till en medicinsk enhet och en Masimo iSirona, Masimo HBox, eller en PC-nod gör du så här:

**Anm** Om du inte behöver en förlängningskabel kan du ansluta Masimo Shuttle direkt till den medicinska enheten.

1. Anslut en förlängningskabel, med en leverantörsspecificerad stiftlayout, till den seriella porten på den medicinska enheten.
2. Sätt i RS-232-hankontakten med 9 stift för Masimo Shuttle i förlängningskabelns honadapter med 9 stift.
3. Anslut USB-A-kontakten för Masimo Shuttle till en USB-port på Masimo iSirona, Masimo HBox, eller PC-noden.

## Lägga till seriell utrustning i DCX

1. På sidan Device List klickar du på fliken **Unconfigured**.

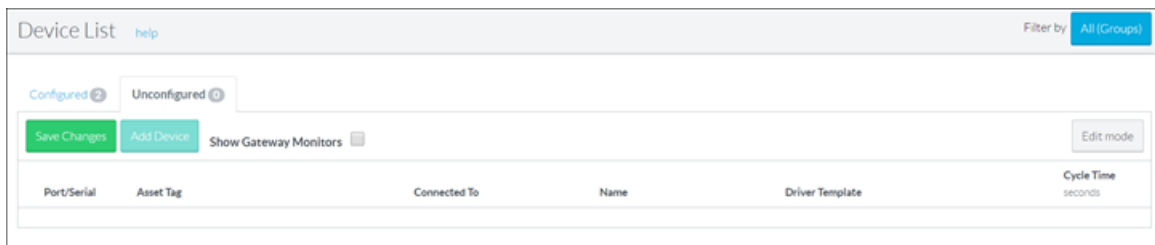

Textrutan **Port/Serial** och den nedrullningsbara menyn **Connected To** fylls automatiskt i med information.

2. Alternativt kan du ange namnet på utrustningens resurstagg i textrutan **Asset Tag**. *Det här steget gäller endast DCX version 5.14 och senare.*
3. I textrutan **Name** anger du utrustningens namn. Namnet på utrustningen måste skilja sig från namnen på systemets övriga utrustning och kan inte innehålla specialtecken.
4. Klicka på den nedrullningsbara menyn **Driver Template** och välj utrustningens drivrutinsmall. *För versioner före DCX 5.15 klickar du på den nedrullningsbara menyn **Driver**.*
5. I textrutan **Cycle Time** anger du hur ofta i sekunder utrustningen skickar data till den nod som den är ansluten till. Du kan även använda pilknapparna för att välja cycle time.
6. Klicka på **Save Changes**.

Systemet konfigurerar utrustningen och lägger till den i ditt system. Den visas på sidan Device List på fliken **Configured** och på sidan System Overview Map.